



# Inkubation Allерcoat™ 6

**individuelle Bestückung  
mit Allergenringen**




**Pipettieren:** 50 µl je Reagenzgefäß



**Inkubieren:** 60 min bei 37 °C



**Waschen:** 300 µl je  
Reagenzgefäß

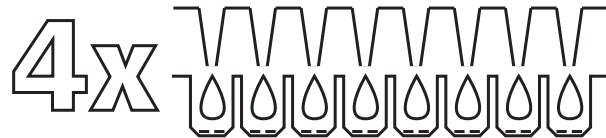

**Pipettieren:** 50 µl je Reagenzgefäß



**Inkubieren:** 60 min bei 37 °C



**Waschen:** 300 µl je  
Reagenzgefäß




**Pipettieren:** 100 µl je Reagenzgefäß



**Inkubieren:** 30 min bei 37 °C



**Pipettieren:** 100 µl je Reagenzgefäß

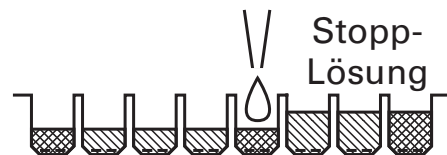

**Auswerten:** Photometr. Messung bei  
405 nm Meßwellenlänge

